

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech[®] Solution Xtra



Almofada & Sistema Modular



Matrix® Flo-tech® Solution Xtra Almofada & Sistema Modular

Combina excelentes propriedades de redução de pressão com a promoção ativa da correção da postura

A almofada *Invacare Flo-tech Solution XTRA* e o Sistema Modular foram desenvolvidos em conjunto com clínicos para responder às especificidades posturais dos utilizadores de cadeiras de rodas. Através do uso do Sistema Modular, as intervenções terapêuticas tornam-se mais eficazes, promovendo uma correta postura que facilitará a função e contribuindo para o aumento do conforto e para a preservação da integridade da pele.



Um saco de fluido duplo cobre toda a superfície da almofada

A área de contacto entre o utilizador e a almofada é protegida, uma vez que o fluido redistribui a pressão para fora das proeminências ósseas. A camada adicional de fluido é incorporada por baixo da zona vulnerável das tuberosidades isquiáticas e sacro, para uma redução mais significativa da pressão. Esta almofada, devido às suas características, é indicada para utilizadores com elevado risco de surgimento de úlceras de pressão.

Capa Impermeável Bi-elástica

A capa bi-elástica é impermeável a líquidos e permeável ao vapor. Dispõe de dois zips: o azul para abrir a capa; o verde para expandir a capa e permitir a colocação dos componentes modulares, assegurando a correta imersão do utilizador sobre a almofada.

Desenhada para promover correção ativa e gestão da postura

Os componentes modulares são concebidos em espuma CMHR de alta densidade e podem ser usados para facilitar uma correção ativa e gestão da postura. As cunhas têm marcas e fixações de faixas aderentes macho/fêmea, permitindo o recorte para adequação às necessidades individuais do utilizador. A aplicação das cunhas por baixo da almofada em combinação com a aplicação dos componentes modulares na superfície, permitem um elevado e versátil conjunto de opções para os terapeutas que implementam intervenções específicas em Posicionamento Sentado.

Características e Opções



Nivelador pélvico

Pode ser colocado em qualquer um dos lados da área isquiática, debaixo da bolsa de fluido. Ajuda a corrigir ou a acomodar obliquidades pélvicas.



Suporte de anca

Pode ser colocado de ambos os lados para promover a estabilização pélvica e o correcto alinhamento da coxa na posição mediana.



Adutor

Aplicado no 1/3 lateral distal do fémur (num ou ambos os lados), reduz a rotação externa e abdução dos membros inferiores.

Características e Opções



Abdutores

Facilita o correcto alinhamento femural. Útil para utilizadores com rotação interna da anca e adução.



Base rígida

Deve ser colocada sob a base da almofada quando aplicada numa cadeira com tela de assento - favorecer uma base plana para maximizar o posicionamento.



Saco de fluido

Auxilia na redução da pressão ao nível das tuberosidades isquiáticas. Colocado à frente pode inibir o deslizamento anterior do utilizador sobre o assento. Colocado lateralmente, auxilia na gestão de obliquidades pélvicas.



Cunha frontal

Colocada por baixo da almofada promove a estabilização pélvica (acomodação da rotação pélvica posterior/ redução da rotação anterior). Útil, por ex. para promover o correto posicionamento de utilizadores que têm tendência em deslizar anteriormente sobre o assento.



Cunhas de canto

Indicadas para situações de rotação lateral da anca para promover o correcto alinhamento.



Cunhas laterais

Colocadas lateralmente debaixo da almofada (espuma pode ser recortada para adequação ao tamanho da almofada), promovem a estabilidade lateral da pélvis.



Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para proteção antimicrobiana e anti-odor.



Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Vários tamanhos	Altura	Peso total	Peso max. utilizador	Temperatura máx. lavagem
				
Uma gama de 44 tamanhos	78 mm	3,08 kg	140 kg	Capa: 80°



Matrx Flo-tech Solution Xtra

Fabricada segundo as normas Europeias:
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores

Tecido Preto impermeável

