


Comando de cabeça e sopro com switch de lábio (ASL109)

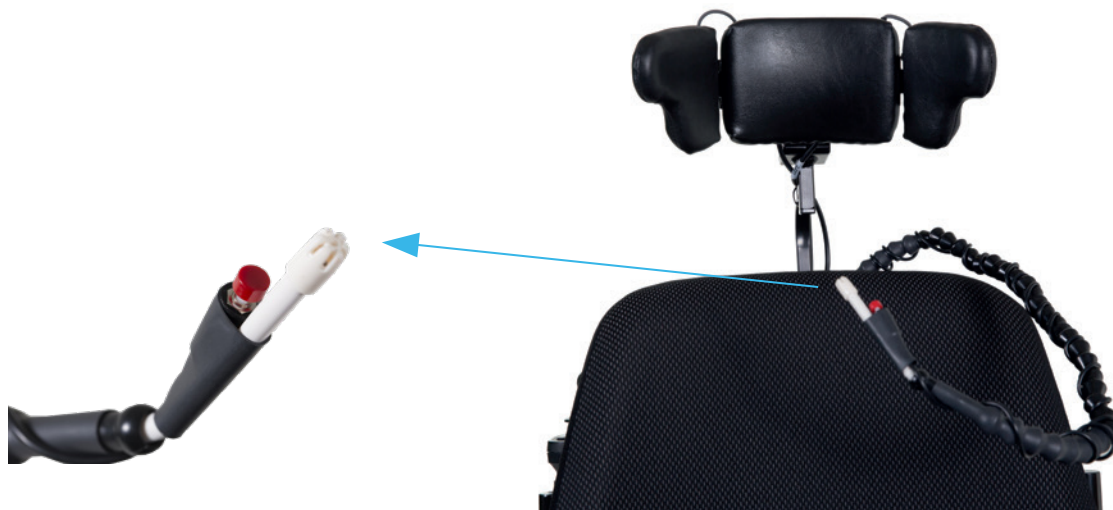

O comando de cabeça e sopro é um comando especial desenvolvido para utilizadores que não têm função e movimento nos membros superiores e com pouco controlo do tronco, mas que têm movimentos laterais da cabeça e mantêm controlo do volume de respiração.

Cada inspiração no comando equivale a andar para a frente e cada sopro equivale a andar para trás, enquanto as viragens para a direita e esquerda são controladas por sensores de proximidade localizados nas almofadas laterais do comando de cabeça. O comando de sopro sem switches direcionais de proximidade depende de inspirações fortes e sopros ligeiros para operar todas as quatro funções.

O switch de lábio pode ser usado para múltiplos propósitos como alteração de função ou perfil da cadeira de rodas elétrica, p.ex.: pouca pressão = alteração de função e pressão longa = alteração de perfil. Também pode ser utilizado para a função de „stop“ quando conduz, como medida de precaução.

Este parâmetro permite condução e modificações intuitivas, o que pode ser conseguido ao fazer rotação da cabeça na direção esquerda ou direita do sensor na almofada enquanto vai em frente em modo automático.

O comando de sopro conecta-se com a Invacare TDX SP2 Ultra Low Maxx através de um módulo de input (vem como standard quando encomenda um comando de sopro).



Para mais informações sobre comandos para cadeiras de rodas elétricas contacte-nos para marketing.pt@invacare.com

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio - Portuga
Tlf.: 225 105 946
Fax: 225 105 739
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Trusted Solutions,
Passionate People

