

## MANUTENÇÃO – SEGURANÇA

Para conservar o bom funcionamento e a segurança do produto, o utilizador deve assegurar que sejam efectuadas regularmente as medidas seguintes:

- Usar um pano macio e húmido para remover poeira e sujidade. Usar água e sabão para remover sujidade incrustada. Secar com um pano macio.
- Seguir as instruções do higienista sobre desinfectação em ambientes hospitalares.
- Assegurar que os parafusos e porcas estejam bem apertados.
- Se a sua andadeira não está em perfeito estado de funcionamento, contacte imediatamente o seu fornecedor. Não usar uma andadeira defeituosa. Não efectue você mesmo intervenções!
- O tempo de vida do produto é de 5 anos


**ATENÇÃO!** Usar apenas como ajuda para caminhar. Peso máximo do utilizador: P409 135 kg. Não nos responsabilizamos por intervenções feitas na andadeira (adaptações, reparações incorrectas etc.), fora do controlo de **INVACARE**.

### INSTRUÇÕES PARA DESTRUIÇÃO DO PRODUTO E DA EMBALAGEM:

No final da vida útil do produto, o mesmo deve ser decomposto e classificado de forma conveniente, juntamente com os acessórios e o material de embalagem.

Na etiqueta existente na P409 encontra-se toda a informação técnica importante.

- 1: N.º de artigo
- 2: Nome do produto
- 3: N.º de lote
- 4: Data de fabrico
- 5: Peso máximo de utilizador
- 6: ATENÇÃO! Ver no manual de utilizador.
- 7: Destina-se a ser utilizado em ambientes interiores e ao ar livre.
- 8: Largura máxima da andadeira.
- 9: Nome do fabricante.

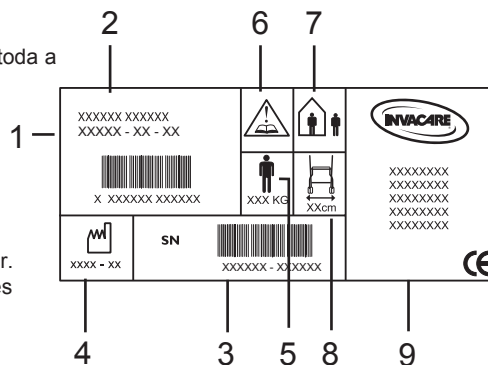


Fabricante:  
Invacare DOLOMITE AB, Växjövägen 303, SE-343 75 Diö, SWEDEN  
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 98, www.dolomite.biz

Empresas de vendas:  
Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-703 Leça do Balio  
TEL: (351) (0)225 1059 46/47, FAX: (351) (0)225 1057 39  
portugal@invacare.com



## P409 ASTERIA

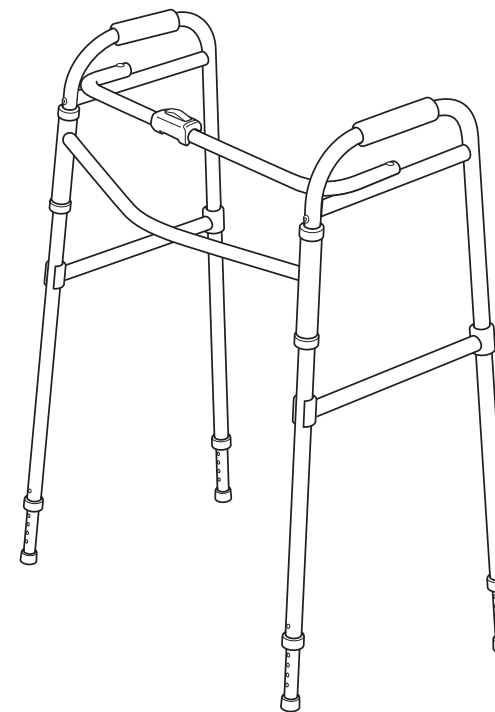

### MANUAL DE UTILIZADOR

Leia com atenção estas instruções de utilização antes de usar o produto. O andadeira é adequado para uso tanto em interiores como ao ar livre.

### UTILIZAÇÃO PREVISTA

A andadeira destina-se apenas a ser utilizada como ajuda para caminhar, qualquer outra utilização implica o risco de lesões.

### NB!

O conteúdo destas instruções deverão ser entregues ao utilizador antes de este ser utilizado.

O prescriptor / revendedor deverá se assegurar que o utilizador tem capacidades intelectuais e físicas suficientes para o uso da andadeira.




1516319-2 100315

## ! SEGURANÇA

- Verifique se a andadeira que lhe foi entregue está em bom estado antes de a usar.
- A andadeira deve estar totalmente desdobrada e bloqueada quando caminhar com a mesma.  
**ATENÇÃO!** Usar apenas como ajuda para caminhar.
- NB! Não se sentar nas barras de encarte
- NB! Não use as barras como apoio.
- Tenha cuidado ao caminhar em piso inclinado.
- Não suba nem desça escadas com a andadeira.
- Não use a andadeira em escadas rolantes.
- Não exceda o peso máximo de utilizador indicado na etiqueta da andadeira.
- Peças gastas, danificadas ou em falta, devem ser imediatamente substituídas por um reparador autorizado.
- Não deixe nem guarde a andadeira ao ar livre.
- Verifique a intervalos regulares a estabilidade da andadeira e, se necessário, se os parafusos e porcas estão apertados e se os calços das patas estão em bom estado.
- Tenha muito cuidado ao usar a andadeira em pisos molhados ou escorregadios.

## REGULAÇÃO DE ALTURA DA ANDADEIRA

Aperte para dentro o botão elástico até a pata se soltar. Ajuste a pata para o comprimento desejado e verifique se o botão de bloqueio sobressai no tubo. Todas as patas devem ficar com o mesmo comprimento.

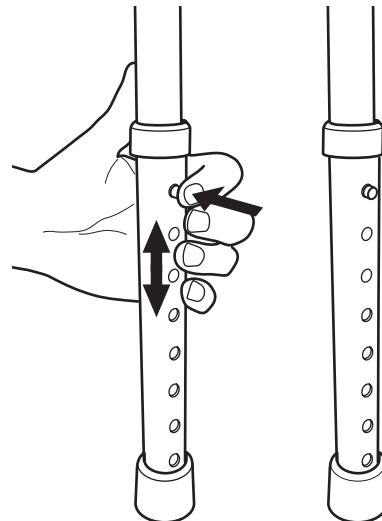

! Não se sentar nas barras de encarte por causa do risco de queda para trás




## ANTES DE USAR

Todas as peças de embalagem devem ter sido removidas antes da andadeira ser utilizada por primeira vez.


## DESDOBRAR

Desdobrar os montantes laterais até se escutar um estalido. Antes de usar a andadeira, assegurar que não é possível dobrar os montantes laterais para dentro.

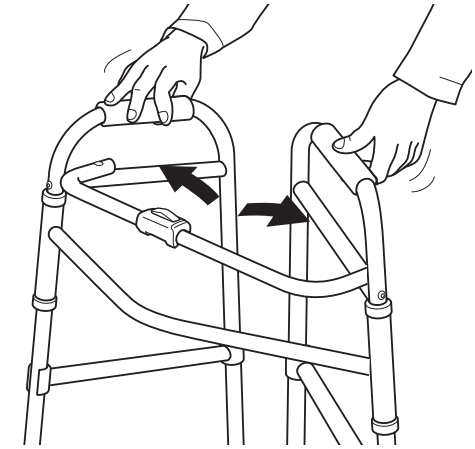

## NB!

! Não active o botão de bloqueio a menos que queira encartar a andadeira

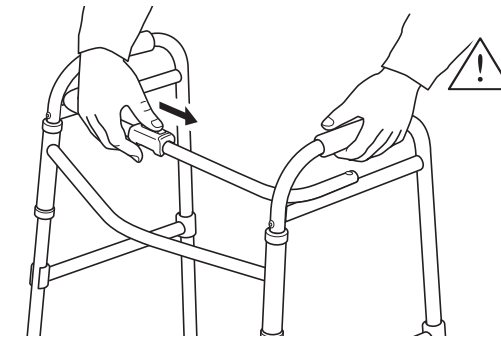

## DOBRAR

Carregar no botão de bloqueio no meio da travessa superior e dobrar os montantes laterais para dentro.

! **ATENÇÃO!** Tomar atenção ao risco de entalamento entre as partes da armação.

